

(KO)  
**시작하기**  
간편 설명서

**경고**



**질식 위험**

본 제품에는 삼킬 수 있는 작은 부품이 포함되어 있습니다. 이러한 작은 부품들은 삼킬 가능성이 있는 사람들과 어린 아이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.

**심각한 건강 사고의 위험**

혈당측정기와 채혈기를 잘못 작동시키면 심각한 건강상의 문제나 손상으로 이어질 수 있습니다.

이 간편 설명서는 혈당측정기와 채혈기의 자세한 사용 설명서를 대체하지 않습니다. 사용 설명서에 포함된 안전 수칙을 반드시 준수하십시오. 검사지에 동봉된 사용 설명서를 읽으십시오.

**감염 위험**

가족을 포함해 다른 사람과 함께 한 채혈기를 사용하거나 의료진이 여러 사람에게 대해 한 채혈기를 사용하면 감염 위험이 있습니다.

**Accu-Chek Softclix (아큐-첵 소프트클릭스) 채혈기는 개인적인 용도로만 사용해야 합니다.**

동일한 사람의 채혈을 하는 데 사용해야 합니다. 이 채혈기는 병원의 전문적인 용도에 적합하지 않습니다.

**감염 위험**

사람의 혈액과 닿는 모든 물체는 잠재적인 감염원입니다.

혈당측정기를 전문적인 용도로 사용 시 의료진의 지침을 준수해야 합니다(사용 설명서의 여러 환자에서 혈당 측정 장 참조).


**개요: 혈당측정기와 검사지**




- 1 디스플레이
- 2 버튼
- 3 검사지 삽입구
- 4 검사지

Accu-Chek Active (아큐-첵 액티브) 혈당측정기를 숙지하십시오. 검사지에 동봉된 사용 설명서를 읽으십시오.


**채혈기 준비**

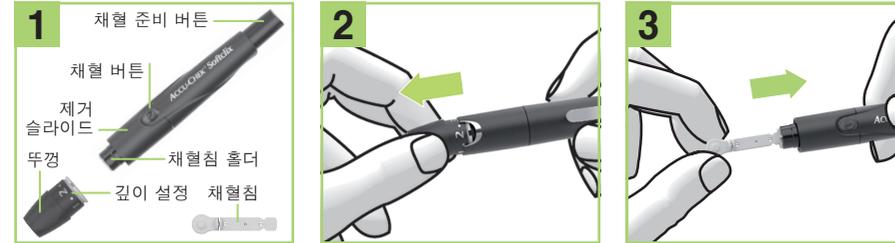


아큐-첵 소프트클릭스 채혈기를 숙지하십시오.

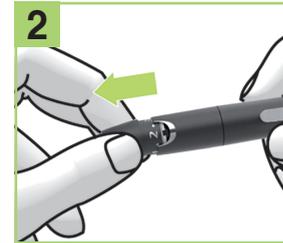


채혈기의 뚜껑을 제거하십시오.

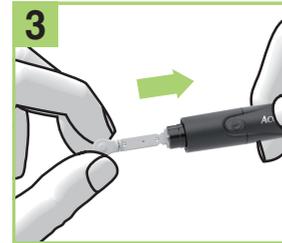


채혈침 홀더에 새 채혈침을 삽입하십시오. 채혈침을 삽입할 때 딸깍 소리가 나야 합니다.

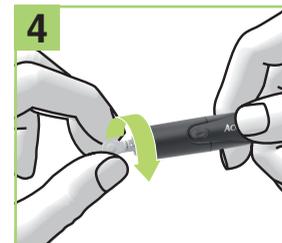

채혈침의 보호 뚜껑을 돌려서 제거하십시오.

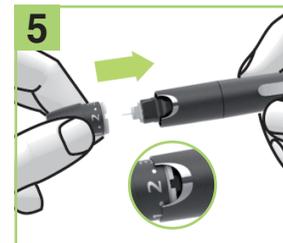

채혈기의 뚜껑을 다시 닫으십시오. 뚜껑을 끼울 때 딸깍 소리가 나야 합니다.

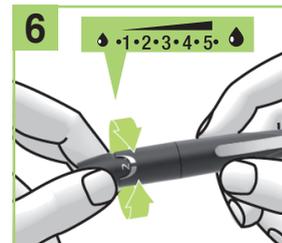

채혈기의 뚜껑을 돌려 채혈 깊이를 선택하십시오. 처음에는 2로 깊이 설정을 하십시오.

**경고**

**감염 위험**

사용한 채혈침은 더 이상 무균 상태가 아닙니다. 채혈할 때에는 항상 새 채혈침을 사용하십시오. 감염의 위험을 줄이고 사실상 통증 없이 채혈할 수 있습니다.

**참고**

아큐-첵 액티브 혈당측정기나 아큐-첵 소프트클릭스 채혈기에 대한 자세한 도움이 필요하면 고객 지원 센터로 연락하십시오.

최종 개정: 2021-07



ACCU-CHEK, SOFTCLIX 및 아큐-첵은 Roche의 상표입니다.

© 2021 Roche Diabetes Care

Roche Diabetes Care GmbH  
Sandhofer Strasse 116  
68305 Mannheim, Germany  
www.accu-chek.com

PDF eckerts3 - Aug 03, 2021

Approved according to SHR SOP 04.07.08 Att. A Vers.4.9 **Kat. 03**  
The Signature will not be printed!

GD/LAY eckerts3 - Aug 03, 2021

PM/LAB obermans - Aug 04, 2021

LAN tsifisa - Aug 03, 2021

09417621001(01)


## 혈당 측정 실시하기




따뜻한 물과 비누로 손을 씻으십시오. 채혈을 하기 전에 손을 잘 말리십시오.




검사지 용기에서 검사지를 삽입하십시오. 검사지 용기 뚜껑을 꼭 닫으십시오.

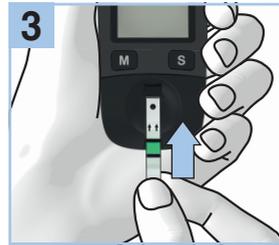


검사지가 구부러지지 않도록 화살표 방향으로 검사지를 검사지 삽입구에 끼워 넣으십시오.

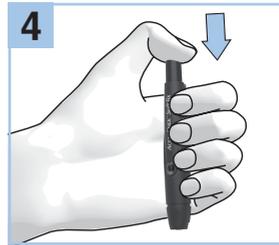

채혈 준비 버튼을 끝까지 누르십시오. 채혈 버튼이 노란색으로 바뀌면 채혈할 준비가 되었습니다.

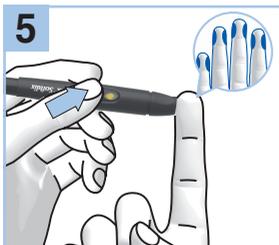


손가락 끝 측면의 선택된 채혈 부위에 채혈기를 단단히 잡고 누르십시오. 노란색 채혈 버튼을 누르십시오.

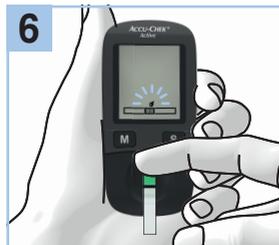

디스플레이에 방울 기호가 깜빡이면: 검사 영역(녹색 사각형) 중간에 혈액 방울을 점적하십시오.




측정이 진행되는 동안 모래시계 기호가 깜빡입니다.

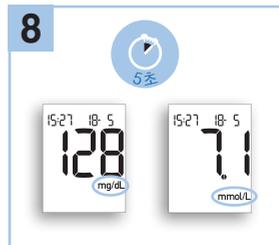

약 5초 후 디스플레이에 측정 결과가 표시되고 신호음이 울립니다.

## 채혈침 폐기

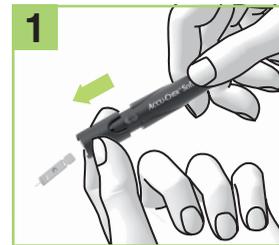

채혈기의 뚜껑을 제거하십시오. 제거 슬라이드를 앞으로 미십시오. 사용한 채혈침을 버립니다.

### ⚠ 주의사항

#### 감염 위험

사용한 채혈침의 바늘은 노출되어 있어 실수로 찔릴 수 있습니다. 감염 예방을 위해 사용한 채혈침은 바늘로 인해 상해를 입지 않는 방법으로 폐기하십시오.

뚜껑을 다시 채혈기에 끼우십시오.

## 에러 메시지

에러가 발생하면 다음 지침을 따르십시오. 혈당측정기를 끄십시오. 상황에 따라 M 버튼과 S 버튼을 동시에 누르거나 혈당측정기에서 검사지를 빼내면 혈당측정기가 꺼집니다.

**E-1** 인쇄된 화살표와 검사 영역이 위로 오도록 검사지를 쥹니다. 검사지가 구부러지지 않도록 화살표 방향으로 검사지를 검사지 삽입구에 끼워 넣으십시오. 검사지가 맞물리는 느낌이 들어야 합니다.  
또는 새 검사지로 혈당측정 또는 컨트롤 용액 검사를 다시 하십시오.  
또는 혈당측정 광학창을 청소하십시오.

**E-2** 새 검사지로 혈당측정 또는 컨트롤 용액 검사를 다시 하십시오.

**E-4** USB 케이블을 제거하고 새 검사지로 혈당 측정 또는 컨트롤 용액 검사를 다시 하십시오.

**E-5** 위치를 바꾸거나 전자기 방사선 원인을 차단하십시오.

**E-5** 혈당측정기를 그늘진 곳으로 옮기거나 몸으로 그늘을 만드십시오.

**EEE** 새 검사지로 혈당측정 또는 컨트롤 용액 검사를 다시 하십시오. 계속 에러 메시지가 나타나면 혈당측정기가 결함이 있는 것입니다. 고객 지원 센터로 연락하십시오.

**!!!** 주위 온도가 +8 ~ +42 °C가 되도록 하고 혈당측정기의 온도가 이 온도가 될 때까지 기다리십시오.