

ACCU-CHEK® Guide 

MULAI DI SINI

PANDUAN PRAKTIS UNTUK MEMULAI CEPAT

Untuk menemukan aplikasi manajemen diabetes yang sesuai dengan glukosameter Anda, kunjungi www.accu-check.com.

ACCU-CHEK®

PERINGATAN

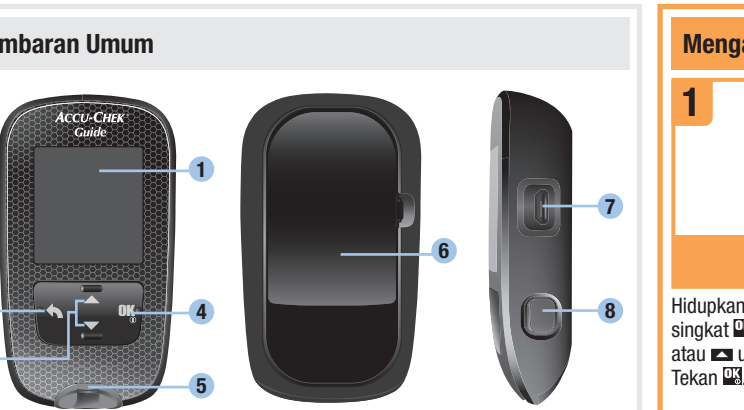
 **Risiko cedera yang mengancam nyawa**
Jauhkan baterai baru dan bekas dari jangkauan anak-anak. Lihat Buku Petunjuk Penggunaan untuk informasi selengkapnya.

Risiko insiden yang serius terhadap kesehatan
Panduan Praktis Untuk Memulai Cepat tidak menggantikan Buku Petunjuk Penggunaan untuk glukosameter Accu-Chek Guide Anda. Buku Petunjuk Penggunaan berisi petunjuk penanganan dan informasi tambahan yang penting.

Risiko infeksi
Saat mengambil tetes darah, pen pencoblos dan tutup dapat bersentuhan dengan darah. Pen pencoblos dimaksudkan untuk penggunaan pribadi saja.

CATATAN

- Selalu sediakan satu set baterai cadangan.
- Masa pakai baterai dapat bervariasi karena faktor-faktor seperti suhu dan produsen baterai.

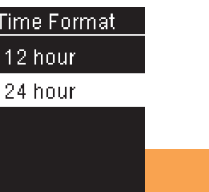


- | | |
|-------------------------------|-------------------------------|
| 1 Layar | 5 Slot Strip Tes dengan Lampu |
| 2 Tombol Kembali | 6 Tutup Baterai |
| 3 Tombol Panah Naik dan Turun | 7 Port mikro USB |
| 4 Tombol Daya/Atur/OK | 8 Ejektor Strip Tes |

Mengatur Bahasa dan Format Waktu

1  Language
 ✓ English
 简体中文
 繁體中文
 Dansk

Hidupkan glukosameter dengan cara menekan singkat  **Language** (Bahasa) muncul. Tekan  untuk menyorot bahasa yang diinginkan. Tekan .

2  Time Format
 ✓ 12 hour
 24 hour

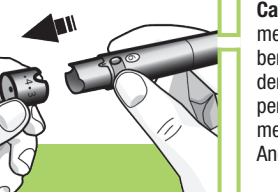
Time Format (Format Waktu) muncul. Tekan  atau  untuk menyorot **12 hour** (12 jam) atau **24 hour** (24 jam). Tekan  untuk menetapkan pilihan dan kembali ke **Main Menu** (Menu Utama).

Menyiapkan Pen Pencoblos

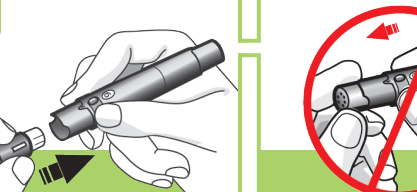
1  Tombol jepret/tembak
 Kedalaman penetrasi
 Jumlah jarum lanset yang tersisa
 Beralih ke jarum lanset berikutnya
 Tutup

1 drum lanset = 6 jarum lanset

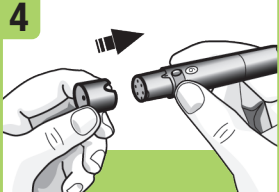
Catatan: Tiap drum lanset berisi 6 jarum lanset steril. Anda dapat melakukan 6 tes sebelum mengganti drum lanset.

2  Lepaskan tutup pen pencoblos dengan cara menariknya hingga lepas. Jangan memutar tutupnya.

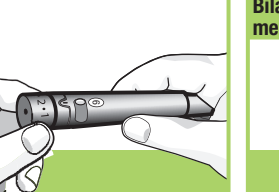
Catatan: Jangan masukkan drum lanset dan menekan tombol jepret/tembak secara bersamaan. Jangan masukkan drum lanset dengan tombol jepret/tembak berada di permukaan, misalnya, di atas meja. Ini dapat menembakkan jarum lanset yang dapat menusuk Anda tanpa sengaja.

3  Masukkan drum lanset – ujung berwarna putih terlebih dahulu – ke dalam pen pencoblos. Dorong terus drum lanset sampai berbunyi klik dan masuk ke posisinya dengan aman.

Catatan: Jangan lepas drum lanset sebelum semua jarum lanset (6 buah) terpakai, karena drum lanset tidak dapat digunakan lagi setelah dilepaskan dari pen pencoblos.

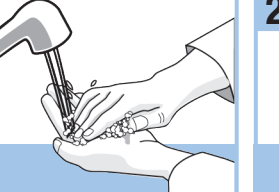
4  Tutup kembali pen pencoblos. Pastikan irisan penempatan pada tutup sesuai dengan irisan penempatan pada pen pencoblos.

Sesuaikan kedalaman jarum lanset hingga kedalaman penetrasi yang sesuai. Mulai dengan 2. Untuk kulit yang lebih tebal, atur sampai nomor yang lebih tinggi.

5  Menggunakan pen pencoblos: Dengan menekan tombol jepret/tembak, pen pencoblos akan siap dan melakukan penusukan dengan 1 klik.

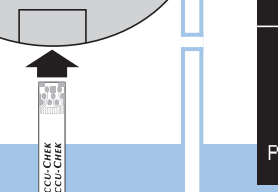
Bila sudah siap melakukan tes...

Melakukan Tes Glukosa Darah

1  Cuci dan keringkan tangan Anda sebelum melakukan tes glukosa darah.

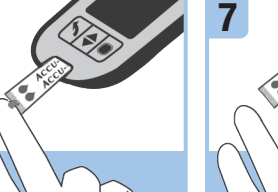
2  Periksa batas tanggal kedaluwarsa pada tabung strip tes. Jangan menggunakan strip tes yang telah melewati batas tanggal kedaluwarsa.

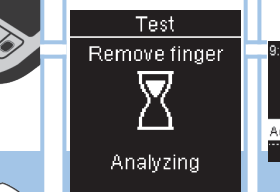
3  Ambil strip tes dari tabung strip tes. Tutup hingga rapat.

4  Masukkan ujung metalik strip tes ke dalam glukosameter.

Glukosameter akan menyala. **Preparing to test** (Bersiap melakukan tes) muncul.

5  Tekan pen pencoblos dengan kuat pada ujung jari Anda dan tekan tombol jepret/tembak hingga ke bawah untuk menusuk jari Anda.

6  Sentuhkan **ujung kuning** strip tes ke tetes darah. Jangan meletakkan darah di atas strip tes.

7  Lepaskan jari Anda dari strip tes bila sudah muncul tulisan **Analyzing** (Menganalisis).

Hasil tes akan muncul di layar dalam waktu kurang dari 4 detik.

Sebelum Anda selesai...  Siapkan pen pencoblos untuk tes berikutnya. Geser tuas ke atas dan kembali sebanyak satu kali untuk maju ke jarum lanset berikutnya. Jendela akan menunjukkan jumlah jarum lanset yang tersisa.

PEMBARUAN TERAKHIR: 2021-07

 Roche Diabetes Care GmbH
 Sandhofer Strasse 116
 68305 Mannheim, Germany
www.accu-check.com

ACCU-CHEK, ACCU-CHEK GUIDE dan FASTCLIX adalah merek dagang dari Roche.

© 2021 Roche Diabetes Care
 08461791061A-0921
 08461791061(01)-0921



This file may not print or view at 100%.
 Die lines and color breaks do not print.

- Roche USA – 83892
 V4/1 – 08461791061A
 08461791061(01) – Black
- Roche USA – 83892
 V4/2 – 08461791061A
 08461791061(01) – Cyan
- Roche USA – 83892
 V4/3 – 08461791061A
 08461791061(01) – Magenta
- Roche USA – 83892
 V4/4 – 08461791061A
 08461791061(01) – Yellow

PMS-QUICK START GUIDE

Approved according to SHR_SOP 04.07.08_Att A **Category 2**
 The Signature will not be printed!

LAN PHAMT34 - Sep 29, 2021

IPM greenk4 - Oct 12, 2021

PM/LAB sovacoee - Oct 05, 2021

GD/LAY cookd4 - Oct 12, 2021

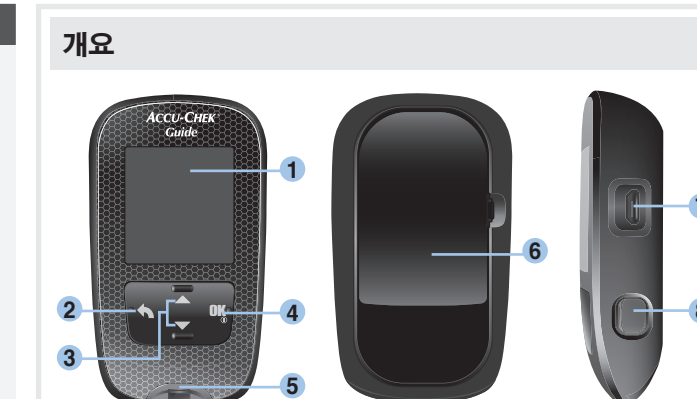
ACCUCHEK® Guide 시작하기 간편 설명서

경고

생명을 위협하는 부상의 위험
새로운 배터리 및 사용한 배터리는 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관하십시오. 자세한 정보는 사용 설명서를 참조하십시오.

심각한 건강 사고의 위험
본 간편 설명서는 Accu-Chek Guide (아큐-체크 가이드) 혈당측정기의 사용 설명서를 대체하지 않습니다. 사용 설명서에는 중요한 취급 주의사항과 추가 정보가 포함되어 있습니다.

감염 위험
혈액 방울을 채혈하는 동안 채혈기와 뚜껑에 혈액이 닿을 수 있습니다. 본 채혈기는 개인적인 용도로만 사용해야 합니다.



- 1 디스플레이
- 2 뒤로 가기 버튼
- 3 상하 화살표 버튼
- 4 전원/설정/OK 버튼
- 5 조명이 적용된 검사지 삽입구
- 6 배터리함 커버
- 7 마이크로 USB 포트
- 8 검사지 제거버튼

참고

- 항상 여분의 배터리 세트를 준비합니다.
- 배터리 수명은 온도 및 배터리 제조사 등의 요인에 따라 다를 수 있습니다.

언어 및 시간 형식 설정

1

Language

✓ English

简体中文

繁體中文

Dansk

☑을 살짝 눌러 혈당측정기를 켭니다. **Language** (언어)가 표시됩니다. ☑ 또는 ☑을 눌러 원하는 언어를 선택합니다. ☑을 누릅니다.

2

시간 형식

✓ 12 시간

24 시간

☑을 살짝 눌러 12 시간 (am/pm) 또는 24 시간을 선택합니다. ☑을 눌러 옵션을 설정하고 **메인 메뉴**로 복귀합니다.

채혈기 준비

1

채혈 버튼

깊이 설정

뚜껑

남은 채혈침 수

새 채혈침을 장전하는 레버

Accu-Chek FastClix (아큐-체크 패스트클릭스) 채혈기를 숙지하십시오.

참고: 각 채혈침 드럼에는 6개의 멸균 채혈침이 들어 있습니다. 채혈침 드럼을 교체하기 전까지 6번의 혈당측정을 할 수 있습니다.

2

채혈기 뚜껑을 잡아당겨 여십시오. 뚜껑을 비틀지 마십시오.

참고: 채혈침 드럼을 채혈기에 밀어 넣는 동시에 채혈 버튼을 누르거나 채혈 버튼이 테이블 상단과 같은 표면 위에 놓인 상태에서 채혈침 드럼을 삽입하지 마십시오. 그럴 경우 채혈침이 방출되어 의도치 않게 찔릴 수 있습니다.

3

채혈침 드럼을 (흰색 끝부분 먼저) 채혈기에 삽입하십시오. 맞물리는 소리가 나면서 제자리에 고정될 때까지 채혈침 드럼을 끝까지 밀어 넣습니다.

참고: 채혈기에서 채혈침 드럼을 제거한 후에는 재사용할 수 없으므로 채혈침 채혈침 드럼을 제거하지 마십시오.

4

채혈기 뚜껑을 다시 닫으십시오. 이때, 뚜껑의 표시를 채혈기 본체의 반달 모양 표시와 일치시키십시오.

5

채혈침 깊이를 편안한 깊이 설정으로 조절하십시오. 처음에는 2로 깊이를 설정하십시오. 두꺼운 피부의 경우 더 높은 숫자를 선택하십시오.

측정 준비를 마친 경우

채혈기 사용하기: 채혈 버튼을 누르면 한 번의 클릭으로 채혈가능합니다.

혈당 측정 실시

1

혈당측정 전에 손을 깨끗이 씻고 물기를 말리십시오.

2

검사지 용기의 사용 기간을 확인하십시오. 사용 기간이 지난 검사지를 사용하지 마십시오.

3

검사지 용기에서 검사지를 꺼내십시오. 검사지 용기 뚜껑을 꼭 닫으십시오.

4

검사지의 금속 끝 부분을 혈당측정기에 삽입해 주십시오.

테스트

테스트 준비 중

혈당측정기가 켜집니다. **테스트 준비 중**이 표시됩니다.

5

채혈기를 손가락 끝 옆에 꼭 대고 채혈 버튼을 눌러 채혈하십시오.

6

검사지의 **노란색 모서리**에 혈액 방울을 묻히십시오. 검사지 윗부분에 혈액을 묻히지 마십시오.

7

분석 중이 표시되면 검사지에서 손가락을 뗍니다.

테스트

손가락을 뗍니다

분석 중

9:38 12/11/15

106 mg/dL

플래그 추가

9:38 12/11/15

5.8 mmol/L

플래그 추가

4초 이내에 디스플레이에 혈당 측정 결과가 표시됩니다.

끝내기 전에...

다음 측정 사용할 수 있도록 채혈기를 준비합니다. 새 채혈침을 장전하는 레버를 앞뒤로 한 번 밀면 다음 채혈침으로 이동합니다. 창에는 남은 채혈침 수가 표시됩니다.

최종 개정: 2021-07

Roche Diabetes Care GmbH
Sandhofer Strasse 116
68305 Mannheim, Germany
www.accu-chek.com

ACCUCHEK, ACCUCHEK GUIDE, FASTCLIX는 및 아큐-체크는 Roche의 상표입니다.

© 2021 Roche Diabetes Care
08461791061A-0921
08461791061(01)-0921

