

ACCU-CHEK®



혈당측정기를 처음 켜면 시간과 날짜를 설정하는 창이 표시됩니다. 시간이 깜빡이면서 set-up(설정)이




▲를 길게 눌러 시간을 설정하고 다음

1 단계와 2 단계를 반복하여 각 입력란을 표시와 일치시키십시오 조정하십시오. 연도를 설정한 후. 깜빡이는 검사지 기호가 표시될 때까지 ▼ 를 길게 누르십시오



Accu-Chek Softclix (아큐-철 소프트클릭스) 채혈기를 숙지하십

시간을 증가시키거나 감소시키려면 🛦

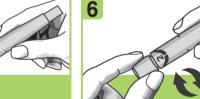

여십시오. 뚜껑을 비틀지

마십시오.

닫으십시오. 이때, 뚜껑의 표시를 채혈기 본체의 반달 모양

설정로 조절하십시오. 처음에는 두꺼운 피부의 경우 더 높은 숫자를 선택하십시오.



맞물리는 소리가 !

삽입하십시오

때까지 채혈침을 채혈기에

채혈 준비 버튼을 끝까지 누르십시오. 채혈 준비 버튼을 누른 상태에서 채혈 버튼을



채혈기가 준비되면 채혈 버튼(채혈기를 손가락 끝 옆에 노란색으로 바뀝니다. 손가력 꾹 대고 노란색으로 바뀐 끝에서 채혈할 준비가 끝날 채혈버튼음 눜러 때까지 채혈기를 한쪽에 치워 채혈하십시오



채혈침의 보호 뚜껑을 돌려 제거하십시오. 씻고 물기를 말리십시오.

혈당 측정 실시



확인하십시오. 사용 기간이 지난 검사지를 사용하지

혈액 방울을 묻히십시오

묻히지 마십시오

검사지 윗부분에 혈액을



혈당측정기에 삽입해 꺼내십시오. 검사지 용기 뚜껑을 꽉 닫으십시오. 주십시오.





깜빡이는 방울 기호가 표시됩니다.

끝내기 전에...



표시되면 검사지에서 손가락을 떼십시오. 검사지에서 손가락을 떼지

않으면 혈당 측정 결과가

정확하지 않을 4

결과가 표시됩니다.

분리하십시오 곳을 향하게 하고 제거 슼라이드를 잎 밀어 사용한 채혈침 버리십시오.

혈당 측정 결과 섹션을 참조하십시오.

또는 컨트롤 용액 검사를 다시 하십시오.

참고: 코드화된 모든 에러 메시지(E−1 ~ E 14)에 대해 에러 코드와 E-8 온도가 시스템의 적정 범위 이상 또는 이하입니다. 시스템 / Err가 디스플레이에 교대로 표시됩니다. 화경은 검사지 사용 설명서를 참조하십시오. 사용화경이 적합한

곳으로 옮긴 다음 혈당측정 또는 컨트롤 용액 검사를 다시 하십시오 언제라도 디스플레이에 아래의 에러 메시지가 표시되는 경우 사용 혈당측정기를 인위적으로 가열 또는 냉각하지 마십시오. ▋설명서의 혈당측정기 유지관리 및 문제 해결 장의 에러 메시지 섹션을 즉시 참조하십시오. E-9 배터리가 부족할 수 있습니다. 혈당측정기를 다시 켜십시오.

주변 환경이 춥다면 따뜻한 공간으로 이동하여 다시 검사를 **E-1** 검사지가 손상되었거나 적절히 삽입되지 않았거나 이미 사용한 하십시오. 다시 시도해도 같은 메시지가 계속 표시되면 배터리를 ▋ 것일 수 있습니다. 검사지를 제거한 후 다시 삽입하십시오. 검사지기 교체하십시오. 배터리를 교체한 후 메시지가 다시 표시되면 배터리를 손상되거나 이미 사용된 경우 교체하십시오.

분리하고 혈당측정기 버튼 중 하나를 최소 2초 동안 누른 후 E-3 혈당측정기 또는 검사지 에러가 발생했습니다. 이 에러 배터리를 다시 끼우십시오. 메시지는 검사지 용기의 뚜껑이 꼭 닫혀있지 않을 경우 나타날 E 10 시간과 날짜 설정이 부정확할 수 있습니다. 혈당측정기가 있습니다. 검사지를 잘못 취급 또는 보관하여 검사지가 손상되었을 페어링된 장치와 시간 및 날짜를 동기화하려고 시도하는 동안 . 에러 메시지를 기준으로 치료 결정을 내리지 마십시오 깜빡이는 무선 기호가 표시됩니다. 무선 기호가 더 이상 표시되지 혈당 측정을 다시 하십시오. 두 번째 E-3 에러 메시지가 표시되면 않으면 위 버튼을 눌러 혈당측정기를 끄십시오. 깜빡이는 검사지

컨트롤 용액과 새 검사지로 컨트롤 용액 검사를 하십시오. 사용 기호가 표시될 때까지 위 버튼을 다시 누르십시오. 시간 및 날짜 설명서 컨트롤 용액 검사장의 컨트롤 용액 검사 섹션을 동기화에 실패하면 혈당측정기에 다음에 전원을 켤 때 설정하라는 참조하십시오. E-3 에러 메시지가 계속 나타나면 보조 메시지 창이 표시됩니다. 사용 설명서의 새로운 혈당 측정 시스템 혈당측정기나 검사지를 사용하는 등 다른 방법을 이용하여 혈당을 장의 시간 및 날짜 설정 섹션을 참조하십시오. 측정하십시오. 대안으로 측정한 혈당 측정 결과 매우 높게

E 11 검사지가 손상되었을 수 있습니다. 새 검사지로 혈당측정 또 사타나거나 혈당 측정을 위한 대안이 없는 경우에는 **즉시 의료진에게** 컨트롤 용액 검사를 다시 하십시오.

E 12 혈액 샘플의 아스코르빈산 혈중농도가 높을 수 있습니다 물긴 하지만 혈당이 매우 높아. 시스템의 측정 범위를 초과했을

·3 에러 메시지가 나타날 수 있습니다. **에러 메시지가 표시되는** 다른 원인을 확인하려면 사용 설명서 혈당 측정 장의 비정상적인 E 13 검사지 삽입구에 액체 또는 이물질이 있을 수 있습니다

검사지를 제거하고 다시 삽입하거나 새 검사지로 혈당측정 또는 컨트롤 용액 검사를 다시 하십시오. 에러가 계속 발생할 경우 고객 E-4 측정을 위해 충분한 혈액 또는 컨트롤 용액을 검사지에 묻히지

E 14 전자 에러가 발생했습니다. 고객 지원 센터로 연락주십시오

참고: 에러 메시지가 계속 나타나는 경우 고객 지원 센터로

E-7 전자 에러가 발생했습니다 배터리를 부리하고 혈당측정기 버튼 중 하나를 최소 2초 동안 누르고 있다가 배터리를 다시 ▋ 끼우십시오. 혈당측정 또는 컨트롤 용액 검사를 하십시오.

않았거나 측정이 시작된 후에 점적했습니다. 검사지를 폐기하고

E-6 디스플레이에 깜빡이는 방울 기호가 표시되기 전에 검사지에

혈당측정 또는 컨트롤 용액 검사를 다시 하십시오.

생명을 위협하는 부상의 위협 새로운 배터리 및 사용한 배터리는 어린이의 손에

닿지 않는 곳에 보관하십시오. 자세한 정보는 사용 설명서를 참조하십시오

심각한 건강 사고의 위험

본 간편 설명서는 Accu-Chek Instant 혈당측정기의 시 유의사항과 추가 정보가 포함되어 있습니다.

혈액 방울을 채혈하는 동안 채혈기와 뚜껑에 혈액이 닿을 수 있습니다. 본 채혈기는 개인적인 용도로만 사용해야

• 항상 여분의 배터리 세트를 준비합니다.

최종 개정: 2021-04



((0123

ACCU-CHEK, ACCU-CHEK INSTANT, SOFTCLIX및 아큐-첵은 Roche의 상표입니다

© 2021 Roche Diabetes Care

09767908061A-0721

www.accu-chek.com



V4/2 - 09767908061A - Cya Roche USA – 83726

설명서를 대체하지 않습니다. 사용 설명서에는 중요한 취급

• 배터리 수명은 온도 및 배터리 제조사 등의 요인에 따라 AN horrixm - Aug 10, 20

IPM suttona2 - Sep 24, 20

andrewc2 - Sep 14, 2

clarkj42 - Sep 24, 20

This file may not print or view at 100%. Die lines and color breaks do not print.

V4/1 - 09767908061A - Black

V4/3 – 09767908061A – Magenta

V4/4 - 09767908061A - Yellow

PMS-QUICK START GUIDE

. Approved according to Category

SHR SOP 04.07.08 Att A

The Signature will not be printed!

Roche USA – 83726

Roche USA – 83726

83726_09767908061A_KO.indd 1

8/9/2021 9:11:04 AM