



시작하기

간편 설명서


혈당측정기 개요

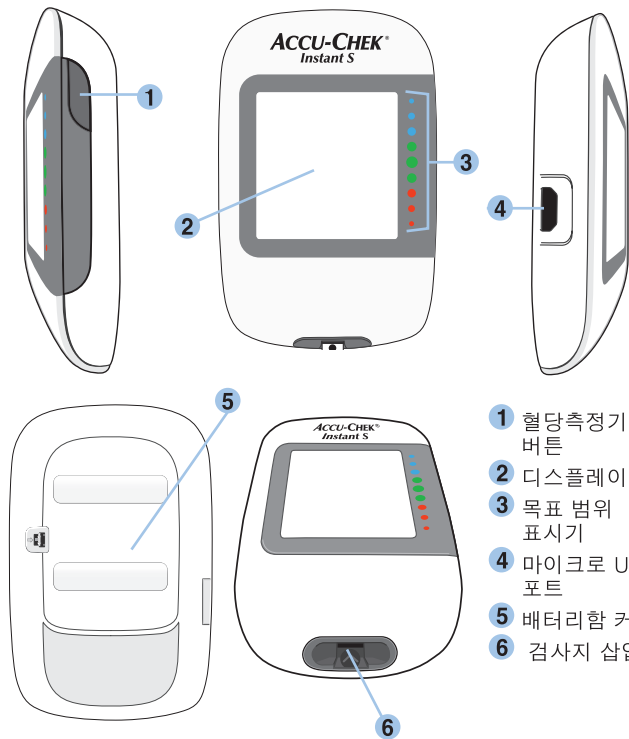


채혈기 준비

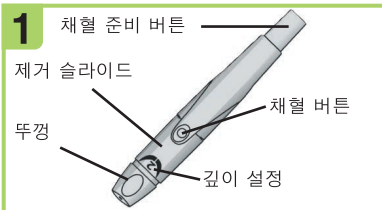


Accu-Chek Softclix (아큐-첵 소프트클릭스) 채혈기를 숙지하십시오.

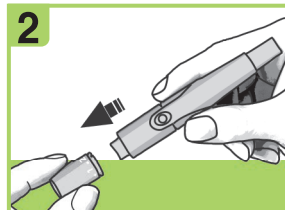


채혈기 뚜껑을 잡아당겨 여십시오. 뚜껑을 비틀지 마십시오.

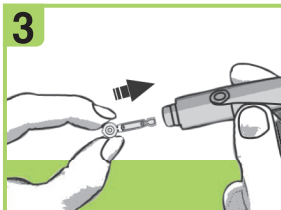

맞물리는 소리가 날 때까지 채혈침을 채혈기에 삽입하십시오.

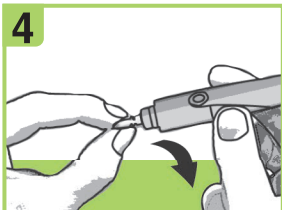

채혈침의 보호 뚜껑을 돌려서 제거하십시오.

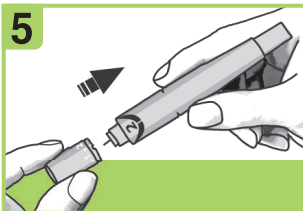

채혈기 뚜껑을 다시 닫으십시오. 이때, 뚜껑의 표시를 채혈기 본체의 반달 모양 표시와 일치시키십시오.



채혈침 깊이를 편안한 단계 설정으로 조절하십시오. 처음에는 2로 깊이를 설정하십시오. 두꺼운 피부의 경우 더 높은 숫자를 선택하십시오.




채혈 준비 버튼을 끝까지 누르십시오. 채혈 준비 버튼을 누른 상태에서 채혈 버튼을 누르지 마십시오. 채혈기가 준비되면 채혈 버튼이 노란색으로 바뀝니다.



손가락 끝에서 채혈할 준비가 끝날 때까지 채혈기를 한쪽에 놓으십시오.

혈당 측정하기

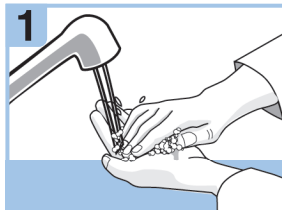

따뜻한 비눗물로 손을 씻고 물기를 완전히 말리십시오.




검사지 용기의 사용 기간을 확인하십시오. 사용 기간이 지난 검사지를 사용하지 마십시오.




검사지 용기에서 검사지를 꺼내십시오. 검사지 용기 뚜껑을 꼭 닫으십시오.



채혈기를 손가락 끝 옆에 꼭 대고 노란색으로 바뀐 채혈버튼을 눌러 채혈하십시오.

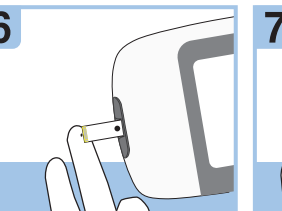


검사지의 **노란색 모서리**에 혈액 방울을 묻히십시오. 검사지 윗부분에 혈액을 묻히지 마십시오.

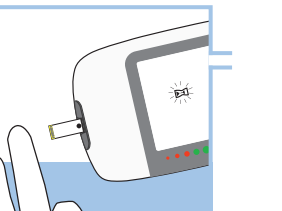


깜빡이는 모래시계 기호가 표시되면 검사지에서 손가락을 떼십시오.


4

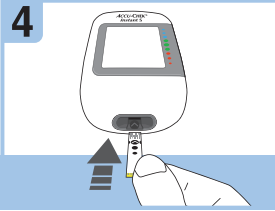

검사지의 금속 끝 부분을
혈당측정기에 삽입해
주십시오.

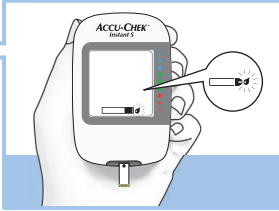

혈당측정기가 켜집니다.
깜빡이는 방울 기호가
표시됩니다.

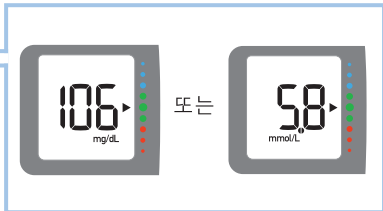

4초 이내에 디스플레이에 혈당 측정
결과가 표시됩니다.



채혈기 뚜껑을
분리하십시오. 채혈침을
자신으로부터 먼 곳을
향하게 하고 제거
슬라이드를 앞으로 밀어
사용한 채혈침을
버리십시오.

에러 메시지

참고: 코드화된 모든 에러 메시지 (E-1 ~ E 14)에 대해 에러 코드와 Err가 디스플레이에 교대로 표시됩니다.

언제라도 디스플레이에 아래의 에러 메시지가 표시되는 경우 사용 설명서의 혈당측정기 유지관리 및 문제 해결 장의 에러 메시지 섹션을 즉시 참조하십시오.

E-1 검사지가 손상되었거나 적절히 삽입되지 않았거나 이미 사용한 것일 수 있습니다. 검사지를 제거한 후 다시 삽입하십시오. 검사지가 손상되거나 이미 사용된 경우 교체하십시오.

E-3 혈당측정기 또는 검사지 에러가 발생했습니다. 이 에러 메시지는 검사지 용기의 뚜껑이 꼭 닫혀있지 않을 경우 나타날 수 있습니다. 검사지를 잘못 취급 또는 보관하여 검사지가 손상되었을 수 있습니다. **에러 메시지를 기준으로 치료 결정을 내리지 마십시오.** 혈당 측정을 다시 하십시오. 두 번째 E-3 에러 메시지가 표시되면 컨트롤 용액과 새 검사지로 컨트롤 용액 검사를 하십시오. 사용 설명서 컨트롤 용액 검사장의 컨트롤 용액 검사 섹션을 참조하십시오. E-3 에러 메시지가 계속 나타나면 보조 혈당측정기나 검사지를 사용하는 등 다른 방법을 이용하여 혈당을 측정하십시오. 대안으로 측정된 혈당 측정 결과 매우 높게 나타나거나 혈당 측정을 위한 대안이 없는 경우에는 **즉시 의료진에게 연락하십시오.**

드물긴 하지만 혈당이 매우 높아, 시스템의 측정 범위를 초과했을 시 E-3 에러 메시지가 나타날 수 있습니다. **에러 메시지가 표시되는 다른 원인을 확인하려면 사용 설명서 혈당 측정 장의 비정상적인 혈당 측정 결과 섹션을 참조하십시오.**

E-4 측정을 위해 충분한 혈액 또는 컨트롤 용액을 검사지에 묻히지 않았거나 측정이 시작된 후에 점적했습니다. 검사지를 폐기하고 혈당측정 또는 컨트롤 용액 검사를 다시 하십시오.

E-6 디스플레이에 깜빡이는 방울 기호가 표시되기 전에 검사지에 혈액 또는 컨트롤 용액을 점적했습니다. 검사지를 폐기하고 혈당측정 또는 컨트롤 용액 검사를 다시 하십시오.

E-7 전자 에러가 발생했습니다. 배터리를 분리하고 혈당측정기 버튼을 최소 2초 동안 누르고 있다가 배터리를 다시 끼웁니다. 혈당측정 또는 컨트롤 용액을 검사하십시오.

E-8 온도가 시스템의 적정 범위 이상 또는 이하입니다. 시스템 사용 환경은 검사지 사용 설명서를 참조하십시오. 사용환경이 적합한 곳으로 옮긴 다음 혈당측정 또는 컨트롤 용액 검사를 다시 하십시오. 혈당측정기를 인위적으로 가열 또는 냉각하지 마십시오.

E-9 배터리가 부족할 수 있습니다. 혈당측정기를 다시 켜십시오. **주변 환경이 춥다면 따뜻한 공간으로 이동하여 다시 검사를 하십시오.** 다시 시도해도 같은 메시지가 계속 표시되면 배터리를 교체하십시오. 배터리를 교체한 후 메시지가 다시 표시되면 배터리를 분리하고 혈당측정기 버튼을 최소 2초 동안 누르고 있다가 배터리를 다시 끼우십시오.

E 10 혈당측정기에 내장된 시계를 다시 설정해야 할 수 있습니다. 혈당측정기 버튼을 누릅니다. 시간과 날짜가 설정되어 있으면 다시 설정해야 합니다. 사용 설명서의 새로운 혈당측정시스템 장의 시간 및 날짜 섹션을 참조하십시오.

E 11 검사지가 손상되었을 수 있습니다. 새 검사지로 혈당측정 또는 컨트롤 용액 검사를 다시 하십시오.

E 12 혈액 샘플의 아스코르빈산 혈중농도가 높을 수 있습니다. 의료진에게 연락하십시오.

E 13 검사지 삽입구에 액체 또는 이물질이 있을 수 있습니다. 검사지를 제거하고 다시 삽입하거나 새 검사지로 혈당측정 또는 컨트롤 용액 검사를 다시 하십시오. 에러가 계속 발생할 경우 고객 지원 센터 로 연락하십시오.

E 14 전자 에러가 발생했습니다. 고객 지원 센터로 연락하십시오.

참고: 에러 메시지가 계속 나타나는 경우 고객 지원 센터로 연락하십시오.

경고



생명을 위협하는 부상의 위험

새로운 배터리 및 사용한 배터리는 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관하십시오. 자세한 정보는 사용 설명서를 참조하십시오.

심각한 건강 사고의 위험

본 간편 설명서는 Accu-Chek Instant S 혈당측정기의 사용 설명서를 대체하지 않습니다. 사용 설명서에는 중요한 취급 주의사항과 추가 정보가 포함되어 있습니다.

감염 위험

혈액 방울을 채혈하는 동안 채혈기와 뚜껑에 혈액이 닿을 수 있습니다. 본 채혈기는 개인적인 용도로만 사용해야 합니다.

참고

- 항상 여분의 배터리 세트를 준비합니다.
- 배터리 수명은 온도 및 배터리 제조사 등의 요인에 따라 다를 수 있습니다.

최종 개정: 2021-06

Roche Diabetes Care GmbH
Sandhofer Strasse 116
68305 Mannheim, Germany
www.accu-chek.com

CE 0123

ACCU-CHEK, ACCU-CHEK INSTANT, SOFTCLIX 및 아큐-체크는 Roche의 상표입니다.

© 2022 Roche Diabetes Care

09774548061A-0522

