

ACCU-CHEK® FastClix

채혈기 / 일회용자동랜셋

일회용자동랜셋

[제품명] Accu-Chek Fastclix Lancet standalone Kit

[허가번호] 수인18-4611호


[제품명] Accu-Chek Fastclix Lancet

[허가번호] 수인18-4579호

채혈기

[제품명] Accu-Chek Fastclix Lancing Device

[신고번호] 수신18-1641호

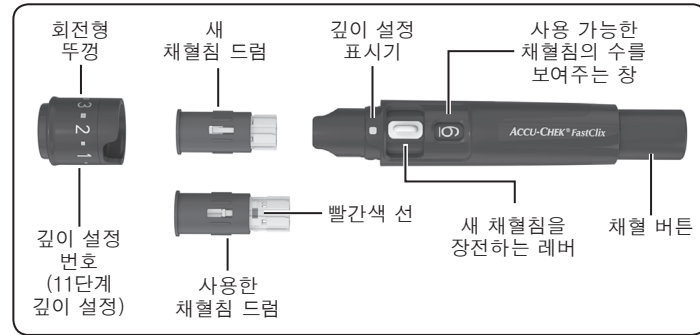

(KO) 사용 설명서

Accu-Chek FastClix 채혈기는 손가락 끝에서 모세혈을 간편하면서 사실상 통증 없이 채혈할 수 있는 장치입니다. 채혈기에는 11단계의 깊이 설정이 있어 피부결에 따라 깊이 설정을 조절할 수 있습니다. 채혈 버튼을 이용해 한 번에 채혈기를 준비하고 채혈침을 작동시킬 수 있습니다. 채혈침이 작동하면 피부에 침투합니다. 6개의 채혈침을 가진 채혈침 드럼을 채혈기에 삽입합니다. 채혈침 드럼을 교환하기 전에 새 멸균 채혈침을 사용해 채혈을 6회 수행할 수 있습니다.

이 사용 설명서에서는 3가지 종류의 기호를 사용합니다.

! 이 기호는 **사용자의 건강을 위협할 수 있는 부상이나 손상**에 대한 주의를 나타냅니다.

! 이 기호는 **채혈기가 손상되는 결과를 초래할 수 있는 행동**에 대한 주의를 나타냅니다.

i 이 기호는 주목이 필요한 **중요한 정보**를 나타냅니다.

! • **Accu-Chek FastClix 채혈기는 자가측정용으로만 사용할 수 있습니다!**

언제나 **동일한** 사람의 혈액만 채혈해야 합니다.

가족을 포함해 다른 사람과 함께 한 채혈기를 사용하거나 의료진이 여러 사람에 대해 한 채혈기를 사용하면 감염 위험이 있습니다. 따라서 이 채혈기는 병원의 전문적인 용도에 적합하지 않습니다.

• 채혈기 또는 채혈침의 모든 구성요소를 3세 미만 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오. 작은 부품(예: 뚜껑 등)을 삼킬 경우 질식 위험이 있습니다.

! Accu-Chek FastClix 채혈기에는 Accu-Chek FastClix 채혈침 드럼만 삽입하십시오. 다른 채혈침 또는 채혈 침 드럼은 채혈기의 작동을 손상하거나 채혈기를 영구적으로 손상시킬 수 있습니다.

준비

- ▶ 채혈 전에 온수와 비누로 손을 잘 씻으십시오(1 참조). 손을 완전히 말리십시오. 이 과정은 채혈 부위의 오염을 줄이고 혈류를 자극합니다.

채혈침 드럼 삽입하기

채혈을 하기 위해 채혈기에 채혈침 드럼을 삽입해야 합니다.

- ▶ 채혈기의 뚜껑을 제거하십시오(2 참조).
- ▶ 새 채혈침 드럼을 (흰색 끝부분 먼저) 채혈기에 삽입하십시오(3 참조).

채혈침 드럼이 채혈기 안에 끝까지 들어가면 적절히 삽입되며, 돌출된 모서리만 채혈기 앞으로 돌출됩니다(4 참조).

! 채혈침 드럼을 채혈기에 밀어 넣는 동시에 채혈 버튼을 누르거나 테이블 위에서 채혈 버튼으로 채혈기를 받치면 안 됩니다. 그럴 경우 채혈침이 방출되어 의도치 않게 찔릴 수 있습니다.

- ▶ 뚜껑을 다시 채혈기에 끼웁니다. 뚜껑 모서리의 절단부가 깊이 설정 표시기와 상응하는 곡면부 주위에 꼭 맞아야 합니다(은색 사각형)(4 참조).

뚜껑이 끝까지 들어가 고정되는 소리와 느낌이 있으면, 뚜껑이 올바르게 끼워진 것입니다.

! 채혈침 드럼이 채혈기 안에 끝까지 들어가야만 뚜껑을 올바르게 닫을 수 있습니다. 뚜껑과 채혈기가 손상될 수 있으므로 뚜껑을 강제로 닫지 마십시오. 대신 채혈침 드럼의 위치를 바로 잡으십시오.

각 채혈침 드럼에는 6개의 채혈침이 들어 있습니다. 이제 첫 번째 채혈침을 사용할 준비가 완료되었습니다. 사용 가능한 채혈침의 수를 보여주는 창에 6이 표시됩니다. 현재 사용할 수 있는 채혈침은 6개입니다(5 참조).

재 사용할 수 있는 채혈침은 6개입니다(5 참조).

i 6개 채혈침을 모두 소모하기 전에 채혈침 드럼을 제거하지 마십시오. 채혈기에서 채혈침 드럼을 제거하면 다시 삽입할 수 없습니다.

깊이 설정

11단계의 깊이 설정(0.5 ~ 5.5)을 설정할 수 있습니다. 채혈기의 은색 사각형(깊이 설정 표시기)은 현재 깊이 설정을 나타냅니다. 큰 숫자일수록 깊이 침투됩니다.

만약 채혈기 사용경험이 없는 경우 깊이 설정 2단계와 같이 낮은 단계부터 설정할 것을 권장합니다.








- ▶ 원하는 깊이 설정이 표시기에 일렬로 맞춰질 때까지 뚜껑을 회전하십시오(6 참조).

혈액 방울 채혈하기

일반적으로 혈액은 어느 손가락에서든 채혈할 수 있습니다. 만약 피부 또는 손톱 감염이 있는 경우 특정 손가락은 부적절할 수 있습니다. 손가락 끝면이 통증에 가장 덜 민감하기 때문에 여기에서 모세혈을 채혈하는 것을 권장합니다.

- !** • 채혈할 때에는 항상 새 채혈침을 사용하십시오. 감염의 위험을 줄이고 사실상 통증 없이 채혈할 수 있습니다.
- 채혈기는 **반드시** 뚜껑이 부착된 채로 사용하십시오. 뚜껑이 없을 경우 채혈침의 침투가 너무 깊어 되어 많은 통증을 유발할 수 있습니다.
- 경우에 따라 채혈 후 채혈침이 뚜껑에서 튀어나올 수 있습니다. 돌출된 채혈침을 만지는 경우 상해 또는 감염 위험이 있습니다. 뚜껑에서 채혈침이 돌출되는 경우 채혈기를 **조심스럽게** 치워 두십시오. 다른 사람이 채혈기를 만지지 못하게 하고 고객 지원 및 서비스 센터에 문의하십시오.

- ▶ 선택된 채혈 부위에 채혈기를 단단히 잡고 누르십시오(7 참조).
- ▶ 채혈 버튼을 끝까지 누르십시오(8 참조).

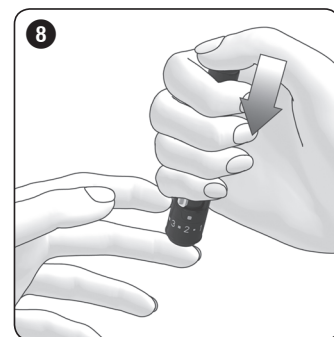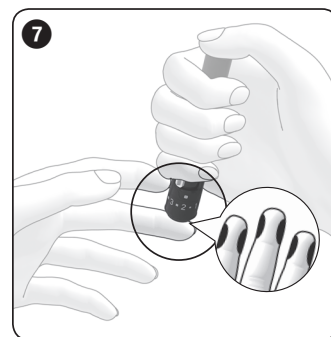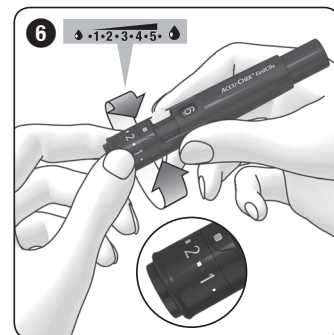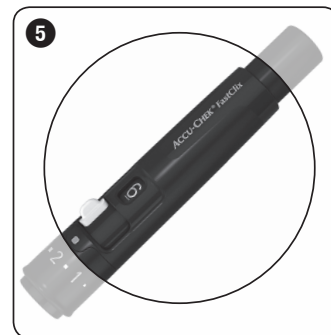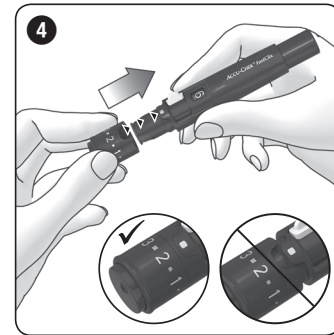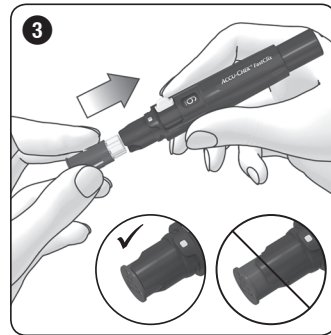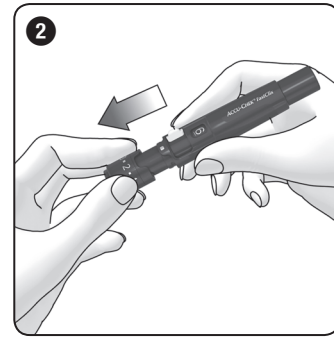

08989664001(01)

PDF ECKERTS3 - Jun 24, 2019

Approved according to
SOP 04.07.08 - Anl. A, Vers. 03
The Signature will not be printed!

Kat. 03

GD/LAY ECKERTS3 - Jun 24, 2019

PM/LAB OBERMANS - Jun 24, 2019

LAN RITZERFL - Jun 24, 2019

채혈침이 해제되어 피부를 침투합니다.

- ▶ 손가락을 손가락 끝 방향으로 살짝 눌러 혈액 방울이 잘 나오도록 하십시오.

혈액의 양은 깊이 설정과 피부에 채혈기를 고정하는데 사용되는 압력에 따라 달라집니다.

충분한 혈액이 나오지 않으면 다음 번 채혈할 때 채혈기에 더 많은 압력을 가하십시오. 충분하지 않을 경우 깊이 설정을 점차 증가 시키십시오.

너무 많은 피가 나올 경우 깊이 설정을 줄이십시오.

- ▶ 혈당측정기 사용 설명서에 따라 채혈 직후 혈당을 측정하십시오.

채혈 부위는 오염으로부터 보호하는 것이 좋습니다.

새 채혈침 장착하기

이미 채혈기를 사용해 채혈한 경우 다음 번에 채혈할 때 새 채혈침이 필요합니다.

- ▶ 채혈기 측면의 레버를 끝까지 눌러 **A** 방향으로 이동한 후 **B** 방향으로 되돌아 오도록 하십시오(⑨참조).

이제 다음 채혈침을 사용할 준비가 완료되었습니다.

레버 옆의 창에는 사용할 수 있는 채혈침의 번호가 표시되며, 하나가 감소 하면 6 대신에 5가 표시됩니다.

- ▶ 채혈침을 교환해야 할 때마다 이전 단계를 진행하십시오.

새 채혈침이 장착될 때마다 창에 표시되는 사용할 수 있는 채혈침의 수가 예를 들어 4에서 3으로 하나씩 감소합니다. 여섯 번째 마지막 채혈침을 장착하면 창에 1이 표시됩니다.

사용이 끝난 채혈침 드럼 교환하기

6번째 마지막 채혈침을 사용하면 사용이 끝난 채혈침 드럼을 새것으로 교환해야 합니다.

- ▶ 채혈기의 뚜껑을 제거하십시오(②참조).

- ▶ 채혈기의 채혈침 드럼을 제거하십시오(⑩참조).

채혈침 드럼의 사용이 끝나면 빨간색 선이 흰색 실린더에 나타납니다.

- ▶ 새 채혈침 드럼을 삽입하십시오(“채혈침 드럼 삽입하기” 섹션 참조).

 사용이 끝난 채혈침 드럼은 다시 사용하지 못하도록 하는 잠금 장치가 내장되어 있습니다.

사용이 끝난 채혈침 드럼은 국내에서 다른 규정이 적용되지 않는 한 가정용 폐기물로 폐기할 수 있습니다.

채혈기 보관하기

채혈기를 차 안 등과 같은 극한의 온도에서 보관하지 마십시오. 이는 채혈기의 작동에 손상을 입힐 수 있습니다.

채혈기와 뚜껑 세척 및 소독

감염 예방을 위해 채혈기와 뚜껑을 다음과 같이 정기적으로 청소하고 소독해야 합니다.

- 매주 최소 1회
- 채혈기 또는 뚜껑에 혈액이 있을 때
- 다른 사람이 채혈기를 손에 쥐기 전에 항상(예: 사용자를 도울 목적으로).

채혈기 전체를 감쌀 수 있는 보풀이 없는 천과 물 그리고 70 % 농도의 이소프로판올을 사용하십시오.

채혈기와 뚜껑을 소독하기 전에 혈액과 기타 오염을 제거하기 위해 이것을 먼저 청소해야 합니다.

 채혈기와 뚜껑의 손상을 피하기 위하여:

- 채혈기와 뚜껑을 용액에 담그지 마십시오.
- 청소에는 물만 사용하고 소독에는 70 % 농도의 이소프로판올만 사용하십시오.

- ▶ 채혈기의 뚜껑을 제거하십시오(②참조).

- ▶ 채혈기의 채혈침 드럼을 제거하십시오(⑩참조).

청소

- ▶ 천에 물을 살짝 묻히십시오.
- ▶ 채혈기와 뚜껑을 꼼꼼히 닦으십시오. 채혈기는 바깥쪽만 닦고(⑪참조) 뚜껑은 바깥쪽과 안쪽을 닦으십시오(⑫참조).
- ▶ 마른 천으로 채혈기와 뚜껑의 물기를 닦으십시오.

소독

- ▶ 천에 70 % 농도의 이소프로판올을 충분히 묻히십시오.
- ▶ 채혈기와 뚜껑을 각각 2분 동안 철저히 닦으십시오. 채혈기는 바깥쪽만 닦고 뚜껑은 바깥쪽과 안쪽을 닦으십시오.
- ▶ 뚜껑을 다시 채혈기에 끼웁니다.
- ▶ 채혈기를 천으로 완전히 감싸십시오.
- ▶ 채혈기를 천으로 감싼 채로 8 분간 그대로 두십시오.
- ▶ 채혈기를 꺼내어 공기 중에서 말리십시오.

대체부위 채혈

손가락 끝 뿐 아니라 다른 부위(손바닥, 팔뚝, 상완, 종아리 또는 대퇴부)에서 소위 대체부위 검사(AST)로 혈당 검사를 위한 모세혈을 채혈할 수 있습니다. 대체 부위에서 모세혈을 채혈하려면 일반 뚜껑을 Accu-Chek FastClix AST 뚜껑으로 교체해야 합니다.

주문 정보

Accu-Chek FastClix 채혈기, Accu-Chek FastClix 채혈침 드럼 또는 Accu-Chek FastClix AST 뚜껑을 주문하려면 고객 지원 및 서비스 센터에 문의하십시오(고객 지원 및 서비스 센터 참조).

최종 개정

2015-06

고객 지원 및 서비스 센터

대한민국

고객 지원 및 서비스 센터
무료상담전화: 080-909-2222
(월-금 오전 9시 - 오후 5시)
www.accu-chek.co.kr

(수입판매원)

한국로슈진단(주)
서울특별시
강남구 테헤란로
108길 22 서경빌딩 4~8층
(대치동)

전화: (02)550-3300/
소비자 상담전화:
080-909-2222

[제조외국]

Roche Diabetes Care GmbH
(독일)
Sandhofer Strasse 116,
D-68305 Mannheim






[제조사]

Gerresheimer Regensburg
GmbH (독일)
Kumpfmuhler Str. 2
93047 Regensburg

Weidmann Medical Technology
AG (스위스)
Neue Jonastrasse 60
CH-8640 Rapperswil

Balda Medical GmbH (독일)
Bergkirchener Straße 228
32549 Bad Oeynhausen

	주의, 이 제품의 사용 설명서 상의 안전과 관련된 설명을 참조하십시오.
	재사용 금지
	유효 기간
	방사선 요법에 의한 멸균
	제조사
	카탈로그 번호
	로트 번호
	상품품목코드
	본 제품은 의료 기기에 대한 유럽 지침 93/42/EEC를 준수합니다.

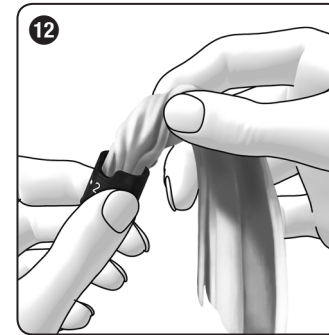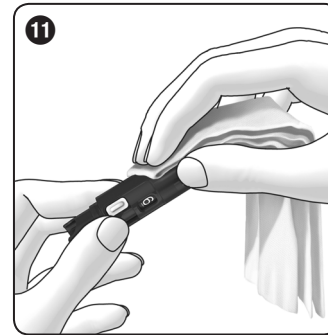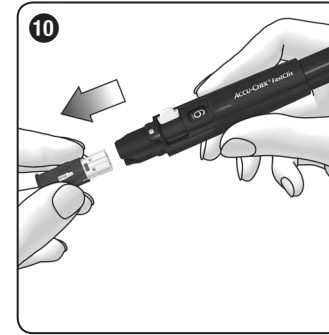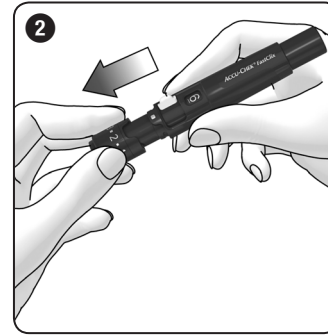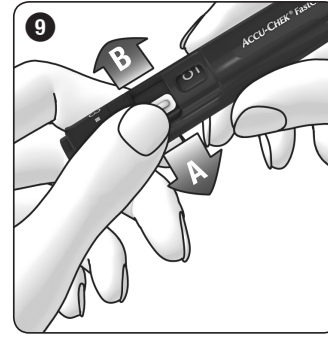

 0088

Accu-Chek, FASTCLIX 및 아큐-체크은 Roche의 상표입니다.

© 2019 Roche Diabetes Care

 Roche Diabetes Care GmbH
Sandhofer Strasse 116
68305 Mannheim, Germany
www.accu-chek.com



08989664001(01)