



아큐-체크 소프트 클릭스 사용방법

01

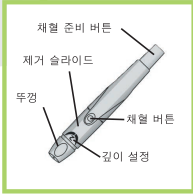


Accu-Chek Softclix
(아큐-체크 소프트클릭스)
채혈기를 숙지하십시오.

02

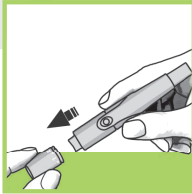


채혈기 뚜껑을 잡아당겨
여십시오. 뚜껑을 비틀지
마십시오.

03

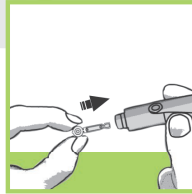


맞물리는 소리가 날 때까지
채혈침을 채혈기에 삽입
하십시오.

04

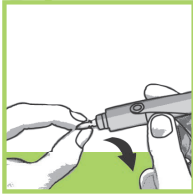

채혈침의 보호뚜껑을 돌려서
제거하십시오.

05

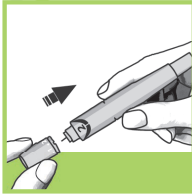


채혈기 뚜껑을 다시 닫으십시오.
이때, 뚜껑의 표시를 채혈기 본체의
반달 모양 표시와 일치시키십시오.

06



채혈침 깊이를 편안한 단계 설정으로 조절하십시오.
처음에는 2로 깊이를 설정하십시오. 두꺼운 피부의
경우 더 높은 숫자를 선택하십시오.

07

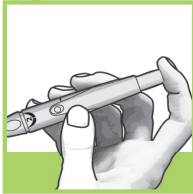

채혈 준비 버튼을 끝까지 누르십시오. 채혈 준비 버튼을 누른 상태에서
채혈 버튼을 누르지 마십시오. 채혈기가 준비되면 채혈 버튼이 노란색으로 바뀝니다.

08



손가락 끝에서 채혈할 준비가 끝날 때까지
채혈기를 한쪽에 놓으십시오.

아큐-첵 소프트 클릭스 사용시 주의사항

- 본 제품에는 삼킬 수 있는 작은 부품이 포함되어 있습니다. 이 제품을 작은 부품을 삼킬 위험이 있는 사람 (예: 어린이) 의 손에 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
- 혈액 방울을 채혈하는 동안 채혈기에 혈액이 닿을 수 있습니다. 감염 예방을 위해 채혈기는 가족을 포함해 다른 사람과 함께 사용하지 마십시오. 의료진은 하나의 채혈기로 여러 사람의 혈액을 채혈하지 마십시오.
- 감염 예방을 위해 혈액 채혈 시 채혈침은 1회만 사용하십시오.
- 유효 기간이 지나지 않은 채혈침만 사용하십시오. 유효 기간은 포장지에 적혀 있습니다.
- 보호 뚜껑이 없는 채혈침은 더 이상 무균 상태가 아닙니다. 채혈침에 보호 뚜껑이 없는 경우 해당 채혈침을 사용하지 마십시오.
- 깊이 설정이 너무 큰 경우 천자로 인해 어린이가 상처를 입을 수 있습니다.
- 처음으로 채혈기를 어린이에게 사용하는 경우 사용전에 의료진에게 문의하십시오. 가장 낮은 침투 깊이 설정에서 시작하십시오.
- 드문 경우 혈액을 채혈한 다음 채혈기에서 채혈침이 다시 올라오지 않을 수 있습니다. 감염 예방을 위해 혈액을 채혈한 다음 뚜껑에서 채혈침이 튀어나오지 않았는지 확인하십시오. 채혈침이 튀어나오는 경우 뚜껑의 앞쪽을 만지지 마십시오. 조심스럽게 채혈기의 뚜껑을 제거하십시오. 채혈침을 제거하고 폐기하십시오. 사용한 채혈침은 바늘로 인해 상해를 입지 않는 방법으로 폐기하십시오. 예를 들어서, 채혈침을 캐놀라 폐기물 용기에 넣으십시오.