

안전하고 위생적인

ACCU-CHEK® Safe-T-Pro Uno



일회용 채혈기는 자동 비활성화 기능을 통해 재사용을 방지하며, 혈당을 보조적으로 모니터링하는 환경에서는 일회용 채혈기를 사용해야 합니다.

Q. 채혈침과 채혈기, 재사용하면 안되나요?

- ✓ 채혈침을 재사용하면 심각한 감염의 위험과 환자 간 교차 오염의 위험 증가할 수 있습니다.
- ✓ 채혈기 바늘을 교체하거나 폐기할 때 사고가 발생할 수 있습니다.
- ✓ 바늘에 찔린 상처로 혈액 매개 바이러스 등 전염병을 옮길 수 있습니다.

CDC Injection safety, CDC Clinical Reminder: Use of Finger stick Devices

국민건강보험

당뇨병 소모성재료 구입비
지원 제품



아큐-첵 세이프티 프로 우노는
한 박스에 200개의 안전랜시가 들어있습니다.

모델명:

Accu-Chek® Safe-T-Pro Uno(아큐-첵 세이프티 프로 우노)

제품관리번호:

DMS0222000090



아큐-첵 고객지원 서비스센터

무료상담전화 | 080-909-2222

전화응대시간 | 월~금 / 공휴일 휴무

(오전 9:00~오후 5:00, 점심시간 오후 12시~1시)

Roche

Accu-Chek Safe-T-Pro Uno(일회용 수동랜싱, 수인 10-751호)
수입판매원 : 한국로슈진단(주)
제조의회사 : Roche Diabetes Care GmbH(독일)
제조자 : HTL-STREFA S.A. (폴란드)

광고심의필: 심의승인번호: 조합-2024-17-086 | 유효기간: 2027-05-08

이 제품은 '의료기기'이며, '사용상의 주의사항'과 '사용방법'을 잘 읽고 사용하십시오.

ACCU-CHEK®
Safe-T-Pro Uno

Roche


Safe & Easy



아큐-첵
세이프티 프로 우노


편안한 그립감의 일회용 안전 랜싱

37330_070524

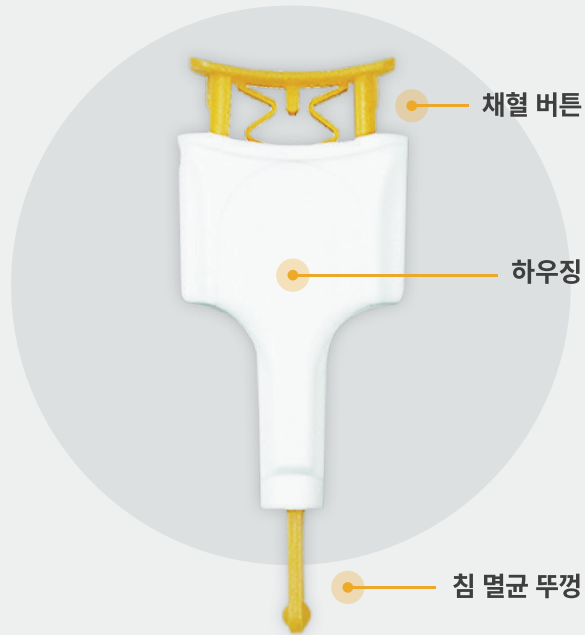


- ✓ 인체공학적인 T-모양 디자인
- ✓ 2단계의 간편한 사용법
- ✓ 1.5mm 채혈 깊이 사전 세팅
- ✓ 피부에 부드럽게 침투하는 3면 특수 커팅 및 실리콘 코팅(28G)
- ✓ 내장된 안전장치 기능으로 사용 후 안전한 폐기 가능
- ✓ 재사용 불가


✓ 편안한 그립감으로 쉽고 안전하게 채혈합니다

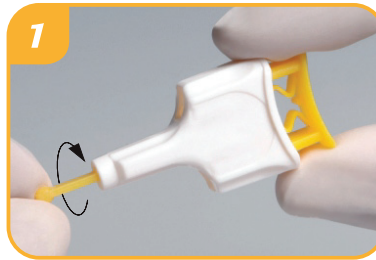

침 멸균 뚜껑을 1/4바퀴 돌린 후 당겨 제거합니다.

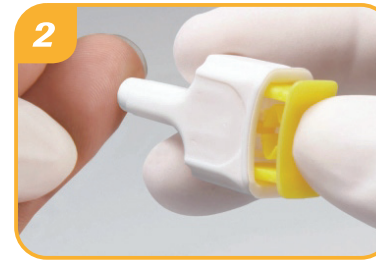


아큐-체크 세이프티 프로 우노를 검지와 중지, 엄지를 이용하여 잡습니다.

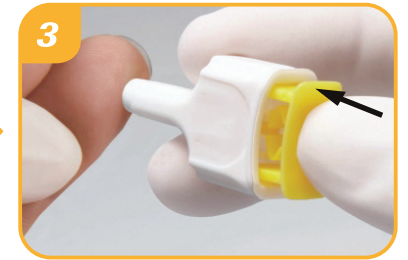

선택한 채혈 부위에 대고 노란색 채혈 버튼을 눌러 채혈합니다.

✓ 손가락 끝 측면에서 모세혈관을 채혈합니다

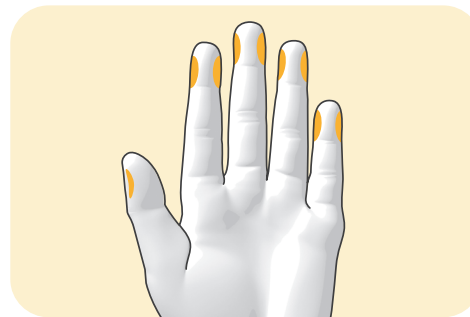

손가락 끝 측면은 다른 손가락 부위와 비교했을 때 통증에 가장 덜 민감합니다.

*혈류가 잘 통하도록 채혈 전 손을 따뜻한 물과 비누로 깨끗하게 씻은 후 완전히 말려주세요.